

Mind Express - GUIDA RAPIDA VERSIONE DIMOSTRATIVA

Questo programma può essere utilizzato per 60 giorni senza limitazioni, dopodiché sarà necessario acquistare la chiave di sblocco (contattare Leonardo srl o il vostro rivenditore) per poter utilizzare il/i programmi senza limiti di tempo

MIND EXPRESS: ATTENZIONE, NELLA VERSIONE DEMO NON VIENE SBLOCCATA L'INTERA LIBRERIA DEI SIMBOLI PCS. PER QUESTO MOTIVO ALCUNE IMMAGINI NON VENGONO VISUALIZZATE NEGLI ESEMPI. RISOLVEREMO IL PROBLEMA CON L'AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEMO.

Quando il programma viene avviato si apre automaticamente una tabella degli esempi. Per visionare gli altri esempi scegliere: File>Apri. A questo punto selezionare il file che si desidera visionare ed effettuare click su Apri.

Tutte gli esempi sono personalizzabili lavorando sulle singole celle. Per poter effettuare cambiamenti è necessario attivare la modalità modifica scegliendo: Modalità>Modifica. A questo punto, facendo doppio click o click destro su ogni singola cella è possibile modificarne l'aspetto e le funzioni. Per utilizzare la tabella è poi necessario chiudere la modalità modifica e scegliere un metodo di accesso (Mouse, Scansione, Joystick)

Questo programma consente non solo di personalizzare i contenuti di ogni singola cella, ma anche di collegare tra di loro diverse tabelle creando così una struttura modulare. Aprendo un file esempio (nella cartella Demo a cui si accede da File>Apri) è possibile visionare la struttura degli esempi da Pagina>Configurazione della pagina. Nella sezione Pagina è possibile visionare, con il menu a tendina, tutte le pagine memorizzate nel file.

Utilizzo a scansione

L'utente può utilizzare le tabelle con diverse modalità (dal menu Modalità): mouse, scansione ad uno o due sensori, sensori multipli con attacco seriale (joystick, per informazioni contattate il vostro rivenditore). Le modalità di scansione sono personalizzabili nella finestra Scansione da Opzioni>Imposta scansione. E' possibile impostare il feedback acustico al passaggio dell'indicatore di scansione (Opzioni>Imposta scansione>Utilizza scansione acustica)

Particolarità di Mind Express

Nella versione completa è presente l'intera libreria dei simboli Bliss e PCS (più di 7000 immagini a colori ed in bianco e nero). E' comunque possibile inserire altre immagini salvate sul proprio PC. Mind Express possiede un modulo grammaticale che effettua automaticamente la coniugazione dei verbi. All'interno del programma sono state inserite circa 500 voci verbali; è comunque possibile inserire nuovi verbi e tutte le informazioni necessarie (finestra Modalità>Modica>doppio click o click destro sulla cella, scrivere il verbo all'infinito e selezionare Verbo>Dati) per effettuare la concordanza con il pronome personale. Lo stesso modulo consente di scegliere un tempo verbale (presente, passato, futuro) ed effettuare la concordanza tra articoli, nomi e aggettivi.

Con Mind Express è possibile creare anche delle tabelle alfabetiche e dedicare alcune celle alla predizione di parola (Skippy compreso nel software).

Molte attività sono scaricabili gratuitamente dal sito www.iocomunico.it

*** GRAZIE PER LE INDICAZIONI CHE VORRETE FORNIRCI!**

Quali programmi avete utilizzato?

Che patologia presenta la persona (o le persone) per cui avete richiesto la demo?

Quanti anni ha/hanno ? _____

Avete incontrato delle difficoltà?

Durante l'installazione

SI NO

Nella programmazione delle attività

SI NO

Nella programmazione della modalità di accesso

SI NO

Altro

Quali sono gli aspetti positivi che avete riscontrato?

Quali sono gli aspetti negativi che avete riscontrato?

Eventuali suggerimenti

***rispedire via fax allo 0522-272586 o per e-mail a staff@leonardoausili.com**